

KN95 hengityssuojain

Suojaa pienhiukkasilta PM 2,5 asti.
Nelinkertainen materiaali.
Suojaimen voi desinfioida alkoholilla tai
60 °C vedellä.

Täyttää standardien GB2626-2006/EN
149:2001-A1:2009 vaatimukset.

Tarkista suojaimen kunto ennen käyttöä.

Vaihda märkä tai rikkoontunut suojain.

Älä muokkaa suojainta.



Avaa suojain
nenäklipsi
ylöspäin.

Aseta suojaimen keski-
kohta nenän päälle,
vedä kuminauhut
korvien taakse.

Muotoile nenä-
klipsi sopivaksi.

Tarkista, että
suojain on tiiviisti
kasvoilla.



**Hygieeniset
yksittäis-
pakkaukset**

**Tilausno: 0143-2
Pakkaus: 50 kpl/rasia.**

Työkalut ja tarvikkeet



VP-SERVICE OY

PL 117
01801 KLAUKKALA
Puh: (09) 878 91 60
www.vp-service.fi

Kotimaiset huipputuotteet tuotantoon, huoltoon ja kunnossapitoon.